

INDYWIDUALNE WKŁADKI ORTOPEDYCZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Adaptacja

Przez pierwsze 3-4 dni użytkowana wkładek możesz odczuwać dyskomfort. Dlatego zalecane są przerwy w noszeniu od 30 minut do 2 godzin. Bagatelizowanie może prowadzić do pojawienia się na stopach odcisków i pęcherzy. Nie ustępujące dolegliwości utrzymujące się dłużej niż tydzień (7 dni) należy skonsultować na wizycie kontrolnej.

Pełna adaptacja następuje po minimum 3 tygodniach ciągłego używania wkładek.

Wizyta kontrolna po 4-6 tygodniach noszenia wkładek .
(Na wizytę zabierz wszystkie posiadane wkładki)

Konserwacja

- Czyść wkładki ręcznie (letnia woda, miękka szczotka i płyn),
- Susz naturalnie (NIE susz na słońcu, grzejniku lub suszarką),
- NIE czyść chemicznie,
- NIE pierz w pralce,
- NIE nagzewaj,
- NIE naprawiaj uszkodzeń samodzielnie,
- Ostrożnie używaj wkładki do butów.

Informacje dodatkowe

Wkładki wykonane są do konkretnego typu obuwia. Nie przekładaj ich do innego typu butów w szczególności z obuwia płaskiego do butów na obcasach lub odwrotnie. Nie docinaj ich samodzielnie.

- Gwarancja na wkładki 12 miesięcy,
- Trwałość wkładek zależy od poziomu aktywności ruchowej oraz ilości używanych par,
- W przypadku osób dorosłych trwałość wkładek wynosi 2-3 lata,
- W przypadku dzieci konieczna wymiana, gdy dziecko z nich wyrośnie,
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją nie mogą być podstawą do reklamacji.



794 220 033



repcja@feetclinic.pl



Feet Clinic